


MINDSET / IHEAL

iHEAL.

La lumière.
À portée de main.

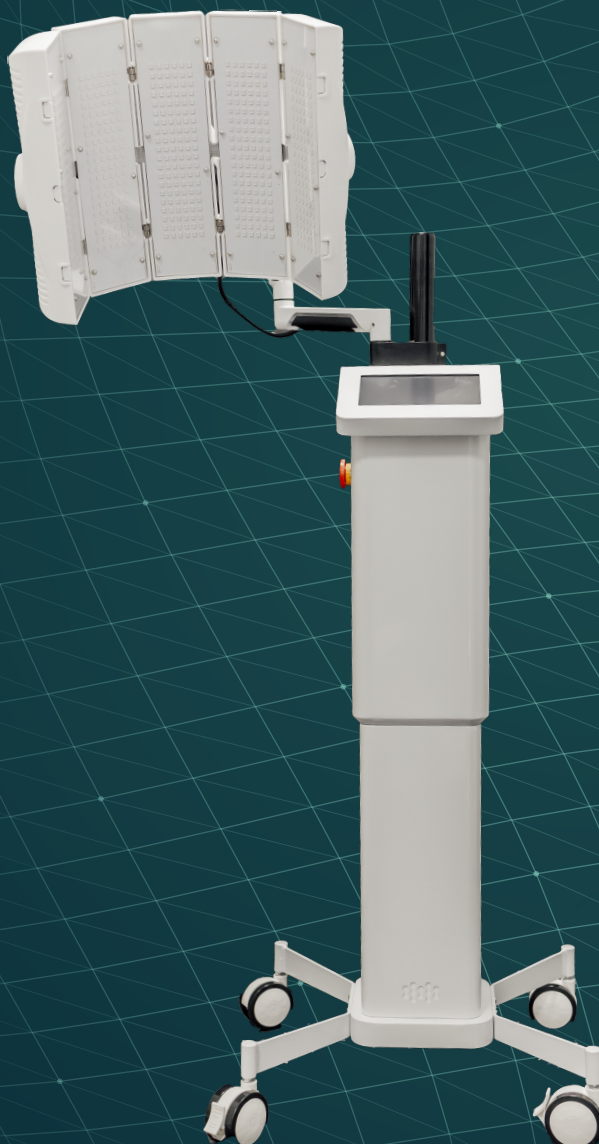

PHOTOBIMODULATION

38

programmes

Une commande dédiée.
Un panneau orientable.
Une base mobile.

iHEAL • DEUXIÈME GÉNÉRATION

Photographies et caractéristiques MINDSET.



MINDSET

IHEAL • CONCEPTION

UNE ARCHITECTURE À DÉCOUVRIR

Chaque détail a sa fonction.



01 Positionner

Un panneau orientable et des charnières à réglage rapide pour ajuster l'orientation.

02 Piloter

Une commande dédiée réunit le logiciel, les programmes et les réglages.

03 Déplacer

Une base sur roues accompagne les changements d'installation.

UNE COMMANDE À PORTÉE DE MAIN

Clé de contact et bouton d'arrêt d'urgence sont intégrés au dispositif.

Exemple d'installation MINDSET. Fauteuil et aménagement illustrés hors définition de l'offre iHEAL.



MINDSET

IHEAL · CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LES REPÈRES DU PRODUIT

Les fonctions. Les caractéristiques.

PANNEAU & PILOTAGE

Architecture

Panneau lumineux orientable sur base mobile

Source lumineuse

Panneau à LEDs

Longueurs d'onde

440 / 470 / 525 / 620 / 680 nm

Pilotage

Logiciel intégré et commande dédiée

Séquences

Gestion de programmes avec enchaînement des couleurs

Programmes libres

M36 Antalgique · M37 Anti-inflammatoire · M38 Cicatrisante · 14 min · 4 cm

Paramètres programmés

Durée, puissance et longueur d'onde

PRISE EN MAIN & ÉQUIPEMENT

Bibliothèque de programmes

38 programmes : 7 dentaires, 28 multispécialités et 3 libres

Commandes de sécurité

Clé de contact et arrêt d'urgence

Mobilité

Base sur roues

Positionnement

Trépied et charnières à réglage rapide

Commande

Panneau de commande rétroéclairé

Audio

Musique de relaxation pendant la séance · clé USB livrée

Caractéristiques de la configuration MINDSET. La configuration livrée est précisée au devis. Usages et programmes selon la notice de la référence.



MINDSET

IHEAL · INTERFACE ET LONGUEURS D'ONDE

UNE COMMANDE DÉDIÉE

Choisir un programme. Lire sa séquence.



BIBLIOTHÈQUE EMBARQUÉE

38 programmes

7 dentaires · 28 multispécialités

3 programmes libres

Chaque fiche indique le numéro, la durée, la distance et la séquence lumineuse.

PROGRAMMES LIBRES

Antalgique · Anti-inflammatoire · Cicatrisante.
14 min chacun · distance 4 cm.

440 nm Violet

470 nm Bleu

525 nm Vert

620 nm Menu ROUGE · rendu rouge profond

680 nm Menu JAUNE · rendu rouge

Les pastilles suivent le rendu lumineux relevé sur l'appareil : menu JAUNE = rouge ; menu ROUGE = rouge profond. Les valeurs en nm reprennent la correspondance transmise par MINDSET.



MINDSET

IHEAL · PROGRAMMES DENTAIRES

BIBLIOTHÈQUE DE L'APPAREIL

Programmes dentaires. M1 à M7.

M1	Péri-implantite · Post-op chir · Extraction · Paro 14 min · distance indiquée 4 cm	4 min 470 nm	5 min 525 nm	5 min 620 nm
M2	Aphtes · Abcès · Brûlures 8 min · distance indiquée 4 cm	2 min 470 nm	3 min 525 nm	3 min 620 nm
M3	Soin dentaire · Facettes · Prothèse 15 min · distance indiquée 4 cm	5 min 470 nm	5 min 525 nm	5 min 620 nm
M4	Herpès labial · Bouton fièvre 8 min · distance indiquée 4 cm	2 min 470 nm	3 min 525 nm	3 min 620 nm
M5	Relaxation 10 min · distance indiquée 4 cm	10 min 440 nm		
M6	Blanchiment dentaire 10 min · distance indiquée 4 cm	10 min 470 nm		
M7	ODF 10 min · distance indiquée 4 cm	5 min 470 nm	5 min 525 nm	

Intitulés et séquences reproduits du menu de l'appareil. Choix et utilisation selon la notice de la référence et l'appréciation du professionnel ; ces menus ne constituent pas une recommandation thérapeutique.



MINDSET

IHEAL · PROGRAMMES MULTISPÉCIALITÉS

BIBLIOTHÈQUE DE L'APPAREIL

Programmes multispécialités. M8 à M13.

M8

Acné · Eczéma · Peau sèche

7 min · distance indiquée 4 cm

2 min

470 nm

2 min

525 nm

3 min

680 nm

M9

Vergeture · Kératose pilaire · Pigmentations

7 min · distance indiquée 4 cm

2 min

470 nm

2 min

525 nm

3 min

680 nm

M10

Acouphène

9 min · distance indiquée 4 cm

3 min

470 nm

2 min

525 nm

4 min

680 nm

M11

Post-inflam · Psoriasis · Verrues

7 min · distance indiquée 4 cm

2 min

470 nm

2 min

525 nm

3 min

680 nm

M12

**Arthrite · Arthrose · Polyarthrite ·
Épicondylite**

7 min · distance indiquée 4 cm

2 min

470 nm

2 min

525 nm

3 min

680 nm

M13

Alopécie

8 min · distance indiquée 4 cm

2 min

525 nm

3 min

680 nm

3 min

620 nm

Intitulés et séquences reproduits du menu de l'appareil. Choix et utilisation selon la notice de la référence et l'appréciation du professionnel ; ces menus ne constituent pas une recommandation thérapeutique.



MINDSET

IHEAL · PROGRAMMES MULTISPÉCIALITÉS

BIBLIOTHÈQUE DE L'APPAREIL

Programmes multispécialités. M14 à M20.

M14	Amincissement 15 min · distance indiquée 4 cm	5 min 525 nm	10 min 680 nm		
M15	Cellulite · Peau d'orange 12 min · distance indiquée 4 cm	2 min 470 nm	3 min 525 nm	3 min 680 nm	4 min 620 nm
M16	Coup d'éclat · Rosacée · Réjuvenation 8 min · distance indiquée 4 cm	2 min 470 nm	2 min 525 nm	4 min 680 nm	
M17	Post-radiothérapie 4 min · distance indiquée 4 cm	2 min 680 nm	2 min 620 nm		
M18	Estompage rides 6 min · distance indiquée 4 cm	3 min 525 nm	3 min 680 nm		
M19	Drainage · Raffermissment 12 min · distance indiquée 4 cm	2 min 470 nm	3 min 525 nm	3 min 680 nm	4 min 620 nm
M20	Inflam post-traum · Fracture · Reconst os 14 min · distance indiquée 4 cm	4 min 525 nm	5 min 680 nm	5 min 620 nm	

Intitulés et séquences reproduits du menu de l'appareil. Choix et utilisation selon la notice de la référence et l'appréciation du professionnel ; ces menus ne constituent pas une recommandation thérapeutique.



MINDSET

IHEAL · PROGRAMMES MULTISPÉCIALITÉS

BIBLIOTHÈQUE DE L'APPAREIL

Programmes multispécialités. M21 à M27.

M21	Carcinome basocellulaire 21 min · distance indiquée 4 cm	2 min 470 nm	7 min 525 nm	7 min 680 nm	5 min 620 nm
M22	Gastro-entérite 11 min · distance indiquée 4 cm	3 min 525 nm	4 min 680 nm	4 min 620 nm	
M23	Chéloïde 7 min · distance indiquée 4 cm	2 min 470 nm	2 min 525 nm	3 min 680 nm	
M24	Rhino sinusite · Migraines · Céphalées 4 min · distance indiquée 4 cm		2 min 680 nm	2 min 620 nm	
M25	Lombalgies chroniques 16 min · distance indiquée 4 cm	4 min 525 nm	6 min 680 nm	6 min 620 nm	
M26	Masque de grossesse 7 min · distance indiquée 4 cm	1 min 470 nm	3 min 525 nm	3 min 620 nm	
M27	Parkinson 8 min · distance indiquée 4 cm	2 min 470 nm	2 min 525 nm	2 min 680 nm	2 min 620 nm

Intitulés et séquences reproduits du menu de l'appareil. Choix et utilisation selon la notice de la référence et l'appréciation du professionnel ; ces menus ne constituent pas une recommandation thérapeutique.



MINDSET

IHEAL · PROGRAMMES MULTISPÉCIALITÉS

BIBLIOTHÈQUE DE L'APPAREIL

Programmes multispécialités. M28 à M35.

M28	Douleurs ATM · Douleur musculaire 14 min · distance indiquée 4 cm	4 min 525 nm	5 min 680 nm	5 min 620 nm
M29	Claquage · Déchirure · Hernie discale 14 min · distance indiquée 4 cm	4 min 525 nm	5 min 680 nm	5 min 620 nm
M30	Sciatique · Ménisectomie 14 min · distance indiquée 4 cm	4 min 525 nm	5 min 680 nm	5 min 620 nm
M31	Torticolis · Tendinite 14 min · distance indiquée 4 cm	4 min 525 nm	5 min 680 nm	5 min 620 nm
M32	Contracture muscul. · Épicondylite golfeur · Lombalgie 14 min · distance indiquée 4 cm	4 min 525 nm	5 min 680 nm	5 min 620 nm
M33	Cervicalgie · Coxalgie 14 min · distance indiquée 4 cm	4 min 525 nm	5 min 680 nm	5 min 620 nm
M34	Entorse · Luxation 14 min · distance indiquée 4 cm	4 min 525 nm	5 min 680 nm	5 min 620 nm
M35	Œdème · Gonalgie 14 min · distance indiquée 4 cm	4 min 525 nm	5 min 680 nm	5 min 620 nm

Intitulés et séquences reproduits du menu de l'appareil. Choix et utilisation selon la notice de la référence et l'appréciation du professionnel ; ces menus ne constituent pas une recommandation thérapeutique.



MINDSET

IHEAL · PROGRAMMES LIBRES

TROIS PROGRAMMES À COULEUR UNIQUE

Programmes libres. M36 à M38.

Une couleur. Une durée fixe de 14 minutes.

M36

Antalgique

Menu BLEU · 470 nm

Rendu lumineux : bleu

14 min

Distance · 4 cm

M37

Anti-inflammatoire

Menu VERT · 525 nm

Rendu lumineux : vert

14 min

Distance · 4 cm

M38

Cicatrisante

Menu ROUGE · 620 nm

Rendu lumineux : rouge profond

14 min

Distance · 4 cm

Les noms Antalgique, Anti-inflammatoire et Cicatrisante correspondent au menu de l'appareil. Usage selon l'indication clinique, la notice de la référence et l'appréciation du professionnel.



MINDSET

IHEAL · VOTRE ENVIRONNEMENT

PRÉPARER VOTRE PROJET

Intégration aisée dans votre environnement.



01 Penser l'espace

Définissez l'emplacement de l'appareil, ses déplacements et l'accès à sa commande.

02 Découvrir les réglages

Une démonstration permet de voir le panneau orientable, les charnières et les fonctions de pilotage.

03 Préciser votre équipement

Le modèle, la configuration, les accessoires et l'accompagnement sont détaillés dans votre devis.

iHEAL · CONFIGURATION SUR DEVIS.

Mise en scène illustrative. Configuration et équipements selon devis.



ÉCHANGÉONS SUR VOTRE PROJET

Découvrir iHEAL. Préparer votre projet.

Une démonstration du produit.
Une configuration pour votre espace.

01 Décrire votre environnement

Espace disponible, organisation et besoins : préparons votre démonstration.

02 Découvrir l'appareil

Panneau, commande et mobilité : examinez les fonctions et la référence proposées.

03 Préciser votre offre

Équipement, livraison, accompagnement et garantie sont détaillés au devis.

Parlons de votre installation.

info@mindset-global.eu ↗

06 50 06 91 31 ↗

Mindset Global SAS · 2 rue du Général de Gaulle, 35360 Montauban-de-Bretagne
SIREN 920 383 452 · TVA FR69920383452

mindset.dental ↗

Collection MINDSET · Septembre 2026. Photographies MINDSET. Usages et programmes selon la notice de la référence et l'appréciation du professionnel. Configuration sur devis.