


I-JET

L'anesthésie. Sous contrôle.

Système électronique d'injection d'anesthésique dentaire.

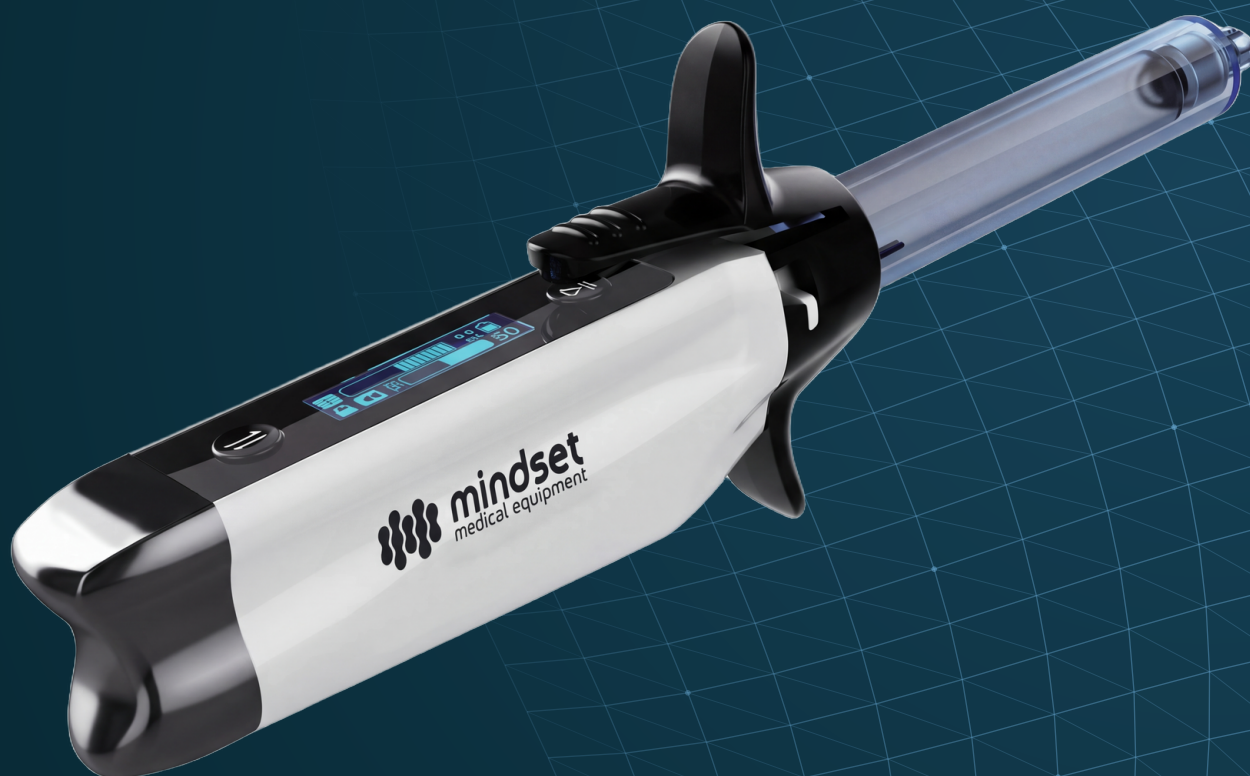

3 modes

Débits programmés

1,8 mL

Cartouche standard

55 g

Pièce à main




MINDSET

I-JET • LE GESTE CLINIQUE

UNE ADMINISTRATION PILOTÉE

Régularité. Précision. Lisibilité.

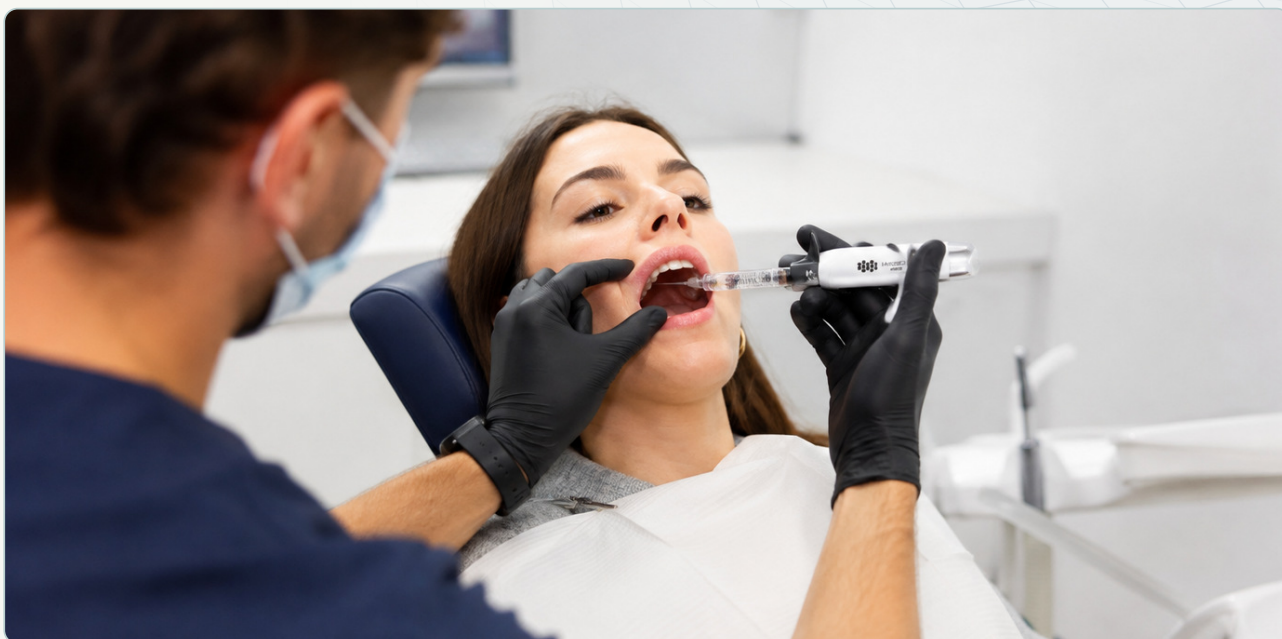

01

Débit et pression

Le système pilote électroniquement le débit et la pression pendant l'injection.

02

Volume visualisé

L'écran indique le volume administré en temps réel pour suivre la progression du geste.

03

Deux techniques

Utilisation prévue pour les anesthésies péri-apicales et intra-ligamentaires (PDL).

Le débit progressif et contrôlé est conçu pour accompagner le confort du patient. Le choix de la technique, du produit, de la dose et du site d'injection relève du praticien.



MINDSET

I-JET • LES MODES

TROIS DÉBITS PROGRAMMÉS

Choisir le rythme. Garder le geste.

01

Haut débit

1,62 mL/min

Mode haut débit indiqué par la fiche technique.

02

Bas débit

1,02 mL/min

Mode bas débit indiqué par la fiche technique.

03

PDL

0,42 mL/min

Mode destiné à la technique intra-ligamentaire.

COMMANDES INTÉGRÉES

Une séquence qui reste lisible.

L'écran accompagne le suivi du volume. Les fonctions de retrait de pression, d'aspiration et de retour du poussoir structurent la séquence d'utilisation.



Tolérance annoncée des trois débits : $\pm 10 \%$. Les fonctions doivent être utilisées conformément à la notice de l'appareil et au protocole clinique retenu.



MINDSET

I-JET · FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compacte. Prête pour le quotidien.

PIÈCE À MAIN

Dimensions

150 × 15 × 12 mm

Poids

55 g

Cartouche

1,8 mL

Prises en main

Type stylo ou type seringue

Affichage

Écran intégré

PILOTAGE ET ALIMENTATION

Débits nominaux

1,62 / 1,02 / 0,42 mL/min

Tolérance de débit

± 10 %

Batterie

3,7 V · 220 mAh

Charge

Base de charge

Fonctions

Contrôle débit/pression, aspiration, retrait de pression, retour du poussoir



Valeurs issues de la fiche technique i-Jet communiquée pour cette édition. Cartouches, aiguilles et anesthésiques sont sélectionnés et utilisés selon leurs propres notices.



MINDSET

I-JET · LE PARCOURS

DU CHARGEMENT AU RETOUR

Une séquence claire. Un geste continu.



01 Préparer

Installer la cartouche de 1,8 mL et les consommables adaptés.

02 Choisir

Sélectionner le mode et vérifier l'affichage avant l'injection.

03 Administrer

Suivre le volume tout en gardant la prise stylo ou seringue.

04 Contrôler

Utiliser les fonctions d'aspiration et de retrait de pression selon le geste.

05 Terminer

Déclencher le retour du poussoir, puis replacer l'appareil sur sa base.

55 G · PIÈCE À MAIN

Deux prises en main :
type stylo ou type seringue.

Avant chaque utilisation, contrôler l'état de l'appareil, sa charge et la compatibilité des consommables. Nettoyage, désinfection et maintenance selon la notice.



MINDSET

VOTRE PROJET AVEC MINDSET

ÉCHANGEONS SUR VOTRE PROJET

Intégrons i-Jet à votre pratique.

Un appareil compact.
Une prise en main accompagnée.

01 Préciser vos usages

Techniques d'anesthésie, organisation du poste et consommables utilisés.

02 Découvrir l'appareil

Fonctions, modes, prises en main et séquence d'utilisation présentés avec vous.

03 Établir votre proposition

Équipement, prestations, disponibilité et conditions de garantie détaillés au devis.

Parlons de votre installation.

info@mindset-global.eu ↗

06 50 06 91 31 ↗

Mindset Global SAS · 2 rue du Général de Gaulle, 35360 Montauban-de-Bretagne
SIREN 920 383 452 · TVA FR69920383452

mindset.dental ↗

Collection MINDSET · Septembre 2026. Visuels de l'appareil et photographies cliniques issus des supports MINDSET. Produit, consommables, prestations et garantie précisés au devis.